

QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test: User Instructions Video Transcript (Spanish)

Voice Over:

Este video proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo usar la prueba QuickVue At-Home OCT COVID-19.

Antes de comenzar las pruebas, lávese las manos o use desinfectante para manos.

Se recomienda que también se utilicen guantes (no incluidos) durante la prueba.

El primer paso es eliminar el contenido de la caja e identificar todos los componentes dentro de la bandeja de prueba.

Incluyendo las instrucciones de usuario paso a paso ...

... un **tubo** prellenado ...

... Un **hisopo** nasal ...

... y una **tira reactiva**.

Para comenzar a ejecutar la prueba, seleccione un **tubo** prellenado de la bandeja y retire la tapa.

Ahora, coloque el **tubo** abierto de nuevo en el orificio etiquetado como "portatubos" integrado en la bandeja. Esto mantendrá el **tubo** seguro mientras se realiza la prueba.

Si está realizando una prueba desde el kit de prueba 25, su bandeja de **tubo** se verá así.

Ahora, abra el **hisopo** pelando el envoltorio y retirando el **hisopo** por el mango. Tenga cuidado de no tocar la cabeza del **hisopo**.

Inserte suavemente el **hisopo** de media a tres cuartos de pulgada en la fosa nasal, dependiendo del tamaño de su nariz.

Frote firmemente ambas fosas nasales con el mismo hisopo antes de continuar.

Si está frotando a otros, use una máscara facial. El procedimiento es el mismo.

Frote ambas fosas nasales con el mismo hisopo antes de continuar.

Con niños o adultos pequeños, la profundidad máxima de inserción en la fosa nasal puede ser inferior a tres cuartos de pulgada.

Después de recolectar la muestra con el **hisopo**, coloque inmediatamente el **hisopo** en el líquido dentro del **tubo** y gire tres o cuatro veces.

QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test: User Instructions Video Transcript (Spanish)

Después de girar, deje el **hisopo** en el **tubo** durante un minuto. Establezca un reloj o cronómetro durante un minuto.

Cuando se complete un minuto, retire cuidadosamente el **hisopo** del **tubo**. A medida que lo retire, gire el cabezal del **hisopo** contra la pared interna del **tubo** para exprimir la mayor cantidad de líquido posible.

Luego deseche el **hisopo** en los desechos domésticos.

A continuación, abra la bolsa de la **tira reactiva** con cuidado arrancando de la hendidura al final de la envoltura ...

... y sostenga la **tira reactiva** como se indica.

Coloque la **tira reactiva** en el tubo con las flechas apuntando hacia abajo.

Establezca un temporizador durante diez minutos. Deje la **tira reactiva** en el **tubo** durante los diez minutos completos. No manipule ni retire la **tira reactiva** antes de que se completen los diez minutos.

A los diez minutos...

...retire la tira reactiva de el tubo...

... y colóquela en el contorno de la tira incluido en la hoja de instrucciones del usuario.

Los resultados deben leerse dentro de los cinco minutos posteriores a la parada del reloj o cronómetro de diez minutos. Pueden producirse resultados no válidos o inexactos si la **tira reactiva** se lee más allá del período de tiempo recomendado de cinco minutos.

El resultado de la prueba se muestra en el área central de la **tira reactiva**.

Compare su resultado con los diagramas de la hoja de instrucciones del usuario.

Un resultado positivo se indica por la presencia de una línea azul y una línea rosa. Mira de cerca. Incluso una línea rosa tenue se considera positiva.

Un resultado negativo se indica por la presencia de una línea azul sin la presencia de una línea rosa.

Se indica un resultado no válido si la línea azul no aparece, incluso si aparece una línea rosa.

**QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test:
User Instructions Video Transcript (Spanish)**

También se indica un resultado no válido si no ve ninguna línea. Si la prueba no es válida, se debe realizar una nueva prueba. Deseche sus materiales y comience de nuevo con un nuevo **tubo** precargada, un nuevo **hisopo** y una nueva **tira reactiva**. Una vez que haya completado la realización de la prueba, todos los componentes de la prueba deben eliminarse en los desechos domésticos.

Una vez que tenga los resultados de su prueba QuickVue At-Home OTC COVID-19, consulte las Instrucciones del usuario o comuníquese con su proveedor de atención médica para conocer los próximos pasos.

Para atención al cliente en los Estados Unidos, llame a ocho tres tres siete ocho cuatro dos dos cinco ocho ocho o visítenos en [QuickVueAtHome.com](https://www.QuickVueAtHome.com)